

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY RỬA ống NỘI SOI PULL THRU™



1. Đầu tiên, thử đầu gạt với đường kính ống nội soi. Nếu thấy không vừa, kiểm tra lại thông tin đường kính ống của nhà sản xuất




2. Cho đầu không có gạt vào trước



3. Đẩy đầu không gạt vào trong lòng ống, đẩy từng đoạn ngắn. Dây PULL THRU™ sẽ dễ dàng đi hết lòng ống



4. Khi đầu không gạt lộ ra ngoài, giữ chặt và kéo cho đến khi toàn bộ dây PULL THRU™ đi qua hết lòng ống nội soi

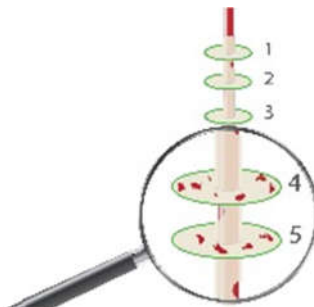

5. Kiểm tra vết bẩn trên đĩa 4 và 5. Nếu thấy, lặp lại các bước từ 1 - 4

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN C.S.C

Email: info@csc.net.vn -

ctycsc@gmail.com

HOTLINE: 0944876766

LUU Ý

1. Đọc kỹ HDSD của nhà sản xuất ống nội soi để biết chính xác đường kính các kênh
2. **LUÔN** kiểm tra độ phù hợp của dây PULL THRU™ với đường kính dây nội soi trước khi sử dụng để đảm bảo lựa chọn đúng loại dây.
3. Để tránh nhiễm chéo, trước khi làm sạch, hãy xác định và chuẩn bị các loại dây phù hợp cho loại ống soi (PULL THRU™, MINI PULL THRU™...)
4. Dây PULL THRU™ cho kết quả tốt nhất khi được nhúng trong bể dung dịch rửa (**LUÔN** làm ướt các đầu gạt trước khi luồn vào lòng ống) - Có thể tham khảo thêm video trên trang <https://www.pullthru.net.nz/products/pull-thru/> để biết rõ thêm
5. Nếu gặp khó khăn trong việc luồn dây PULL THRU™ vào kênh, có thể cân nhắc đổi ngược hướng mà không gây ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình làm sạch (Ví dụ: luồn từ khối sáng sang tay cầm). Trong trường hợp vô tình chọn sai kích thước dây, **KHÔNG** cố luồn dây vào ống. Việc cố luồn dây có kích thước không phù hợp có thể gây hỏng dây nội soi.
6. Dây PULL THRU™ được thiết kế để làm sạch ngay sau **MỘT** lần rửa. Cần tuân thủ các quy định nội bộ của đơn vị để xác định số lần rửa cho mỗi kênh.