



Abbott

DÒNG SẢN PHẨM BIOLINE™ Dengue RDT

Phát hiện tất cả các giai đoạn lâm sàng khi
nhiễm bệnh sốt xuất huyết.

COMBO NS1 Ag + Ab | NS1 Ag | IgG/IgM

Dòng sản phẩm BIOLINE™ Dengue RDT

PHÁT HIỆN TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG KHI NHIỄM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG BIOLINE™ DENGUE DUO (XÉT NGHIỆM KẾT HỢP NS1 Ag VÀ IgG/IgM)?

Xét nghiệm chỉ bằng Dengue IgG/IgM Ab Test



Bệnh nhân (nghe mắc sốt xuất huyết) sốt cao từ tối qua.



Bệnh nhân đến bệnh viện vào sáng hôm sau.



Bác sĩ tư vấn không phải sốt xuất huyết vì bác sĩ chỉ xét nghiệm bằng xét nghiệm Dengue IgG/IgM Ab.

Xét nghiệm chỉ bằng Dengue NS1 Ag Test



Bệnh nhân (nghe mắc sốt xuất huyết) sốt cao từ một tuần trước.



Bệnh nhân uống thuốc giảm đau nhưng không hạ sốt.




Bệnh nhân đến bệnh viện vào sáng hôm sau.



Bác sĩ tư vấn không phải sốt xuất huyết vì bác sĩ chỉ xét nghiệm bằng xét nghiệm Dengue NS1 Ag.


Xét nghiệm bằng BIOLINE™ Dengue Duo (NS1 Ag và IgG/IgM WB)

PHÁT HIỆN TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG

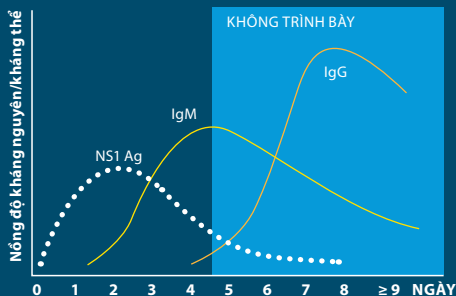


NS1 Ag

đối với mẫu bệnh phẩm ở giai đoạn cấp tính (ngày 1~5)

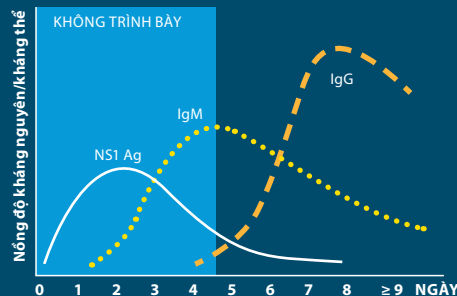

IgG/IgM

đối với mẫu bệnh phẩm ở giai đoạn hồi phục (sau ngày 3~5)

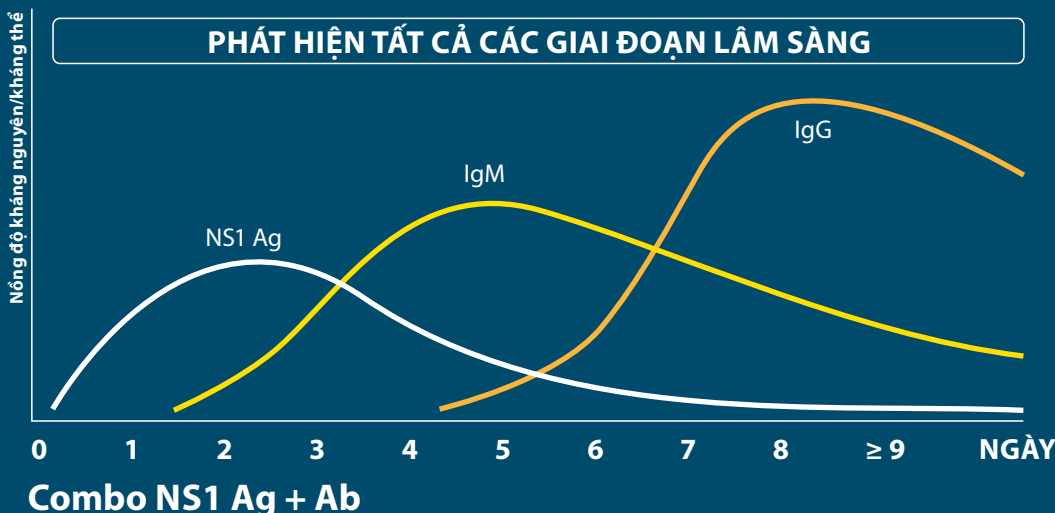


BIOLINE™ Dengue Duo (NS1 Ag và IgG/IgM WB)

Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh được thiết kế để phát hiện cả kháng nguyên NS1 của vi-rút sốt xuất huyết và kháng thể IgG/IgM chống lại vi-rút sốt xuất huyết trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của con người.

- Bao gồm tất cả các giai đoạn lâm sàng từ giai đoạn cấp tính đến hồi phục
- Có nhanh kết quả xét nghiệm: 15~20 phút
- Điều kiện bảo quản thuận tiện: 1°C–30°C

	DENGUE NS1 Ag (VS, RT-PCR)	DENGUE IgG/IgM (VS, ELISA)
ĐỘ NHẠY	92,4%	94,2%
ĐỘ ĐẶC HIỆU	98,4%	96,4%

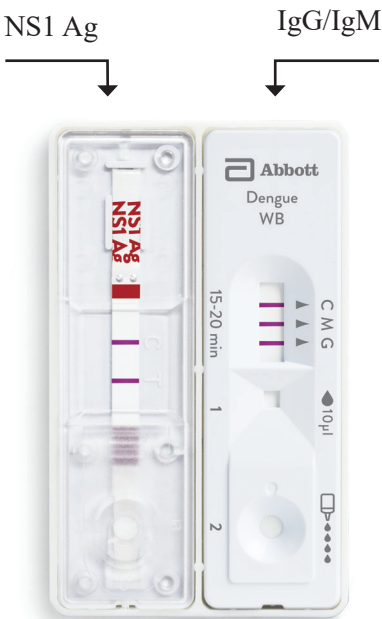

Quy trình Xét nghiệm Đơn giản

Dengue NS1 Ag


1 Bằng ống nhỏ giọt dùng một lần, nhỏ 3 giọt (khoảng 100 µL) huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần vào giếng mẫu (S).

Dengue IgG/IgM WB


2 Bằng ống hút mao quản, thêm 10 µL huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần vào giếng hình vuông.

3 Thêm 4 giọt (khoảng 90~120 µL) chất pha loãng xét nghiệm vào giếng tròn.

ĐỌC KẾT QUẢ

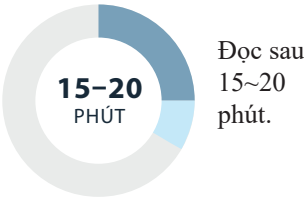


⊕ Dương tính

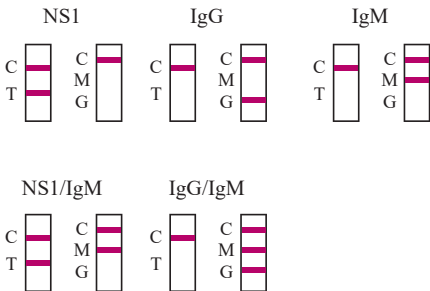

⊖ Âm tính



⊗ Không hợp lệ

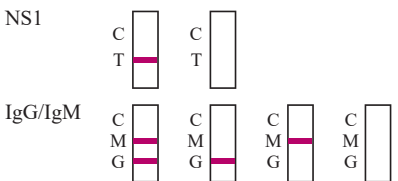


Các Xét nghiệm Đơn BIOLINE™ Dengue

BIOLINE™ Dengue NS1 Ag Test

- Chẩn đoán sốt xuất huyết cấp tính bằng phát hiện NS1 Ag
- Phát hiện sốt xuất huyết NS1 Ag từ ngày thứ 1 sau khi khởi phát sốt (giai đoạn cấp tính)
- Có nhanh kết quả xét nghiệm: 15~20 phút
- Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần
- Nhiệt độ bảo quản: 1°C–30°C
- Độ nhạy: 92,4%, Độ đặc hiệu: 98,4%

BIOLINE™ Dengue IgG/IgM Test

- Phát hiện phân biệt IgG và IgM để hỗ trợ chẩn đoán giả định giữa nhiễm sốt xuất huyết nguyên phát và thứ phát
- Phát hiện kháng thể IgG và IgM kháng vi-rút Dengue
- Có nhanh kết quả xét nghiệm: 15~20 phút
- Nhiệt độ bảo quản: 1°C–30°C

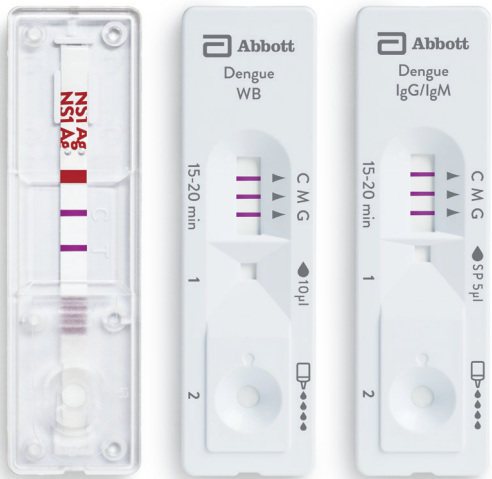

DENGUE IgG/IgM (11FK10)	
ĐỘ NHẠY	94,6%
ĐỘ ĐẶC HIỆU	96,5%
MẪU BỆNH PHẨM	HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MẪU BỆNH PHẨM	LOẠI	XÉT NGHIỆM/ BỘ XÉT NGHIỆM
DENGUE DUO	11FK45	XÉT NGHIỆM DENGUE NS1 AG VÀ IGG/IGM AB	MÁU TOÀN PHẦN/ HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG	THANH THỦ KÉP	10T
DENGUE NS1 AG	11FK50	XÉT NGHIỆM DENGUE NS1 AG	MÁU TOÀN PHẦN/ HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG	THANH THỦ	25T
DENGUE IGG/IGM	11FK10	XÉT NGHIỆM DENGUE IGG/IGM AB	HUYẾT THANH/HUYẾT TƯƠNG	THANH THỦ	25T

Tên TTBYT	Chủng loại	Mã sản phẩm	Số lưu hành	Chủ sở hữu số lưu hành	Nhà sản xuất	Nước sản xuất
Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue, kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue	Bioline™ Dengue DUO	11FK45	2300014ĐKLH BYT-TB-CT	Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại TP Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 7, tầng 8, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội	Abbott Diagnostics Korea Inc., 65, Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17099, Republic of Korea	Hàn Quốc
Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue	Bioline™ DENGUE IgG/IgM	11FK10	2300160ĐKLH BYT-TB-CT			
Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue	Bioline™ Dengue NS1 Ag	11FK50	2300041ĐKLH BYT-TB-CT			

NHÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ TRANG TBYT PHÚ AN
Địa chỉ: 339/60 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 0989927318 (HCM) hoặc 0988076807 (Hà Nội)
Email: thietbiytephuan.vn@gmail.com
Website: <https://thietbiytephuan.vn/>

